

# FICHA TÉCNICA

Producto

## KN95 MASCARA FACIAL PROTECTORA (RESPIRATOR)

HUATE®



allergika  
chile

### FABRICADO POR:

Guangzhou bofite safety protective equipment Co., Ltd  
Workshop 8, Yinsha Industrial Zone, Xintang Town, Zengcheng District,  
Guangzhou China

### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Allergika Chile SPA  
Badajoz 130 of 805 Las Condes Santiago  
[www.allergikachile.com](http://www.allergikachile.com)





## CARACTERISTICAS

Máscara plana, frente redondeado, con fijación tras oreja.

Cómoda de usar.

Arco nasal ajustable



## PRESENTACION

Caja de 50 unidades



## COLOCACION de la Mascarilla KN95



1. Saque la mascarilla de su envase y ajústela a su nariz y mentón.
2. Tome las tiras con ambas manos y simultáneamente fijela detrás sus orejas.
3. Ajuste el puente nasal presionándolo suavemente hasta que quede fijo
4. Con sus manos termine ajustando la mascarilla de manera que se adhiera a su cara.

Para retirar la mascarilla tómela desde los lazos tras las orejas, con ambas manos, y la mueve hacia delante de su cara. Nunca toque la parte frontal de la mascarilla con sus manos ya que puede contaminarse. Deposítela en un recipiente solo para desechar este material. Lave sus manos con jabón 40 segundos o alcohol gel antes y después del procedimiento.

### USO

Este producto es para uso individual.

Se aprobó para una protección ante partículas mayores a 0.075 micrones. Cuando mantiene sus capas sin alterarse.

Durante su uso evite tocar la mascarilla con sus manos.

El uso de una mascarilla como la KN95 no implica que se dejen las otras medidas de seguridad como la distancia social, idealmente de 2 metros y el lavado de manos.

Reglamentos en aplicación en Chile regula el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

### REUTILIZACION

Se entiende que su uso continuo es entre algunas horas y un día.

La mascarilla no debe lavarse ya que se separan sus capas.

No debe limpiarse con alcohol 70% ya que pierde sus características de filtración.

Hasta este momento no hay acuerdo en la reutilización de una mascarilla N95 o KN95, entre los distintos expertos. Debe considerarse que una mascarilla puede estar contaminada por virus durante su uso, de ahí que la reutilización puede transformarse en riesgo de contagio para quién la manipule después del uso.

Ante la escasez de estos dispositivos se han propuestos algunas opciones de sanitización de estas. Para ello ingrese a nuestro sitio web [www.allergikachile.com](http://www.allergikachile.com) donde encontrará sugerencias de expertos.



---

Regístrese en [www.allergikachile.com](http://www.allergikachile.com). Ahí tendremos actualizaciones sobre el uso de las mascarillas, consejos y medidas de protección personal.

Consultas y cotizaciones [contacto@allergikachile.com](mailto:contacto@allergikachile.com)  
WhatsApp +569 4002 0188

# ANEXOS



Supervised by China Academy of Safety Science and Technology



**TEST REPORT**  
**EN 149**  
**Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles.**  
**Requirements, testing, marking**

**Report Reference No**.....: CTO200326122MRS

**Compiled by (+ signature)**.....: Laurent Wu

**Approved by (+ signature)**.....: Mike Wang

**Date of issue**.....: Mar. 24, 2020



**Testing Laboratory**.....: SHENZHEN CTO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD

**Address**.....: 9/F, Block B, 196 Tangtou Avenue, Langxin Community, shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China

**Applicant's name**.....: Guangzhou Bofeite Safety Protective Supplies Co.,Ltd

**Address**.....: First Floor (Part) ,Third Floor(Part), Fourth Floor And Fifth Floor(Part), No.8 Plant, Xingfu Road, Shapu Yinsha Industrial District, Xintang Town, Zengcheng District,Guangzhou City

**Test specification:**

**Standard**.....: EN 149:2001+A1:2009

**Non-standard test method**.....: N/A

**Test item description**.....: Face Mask

**Trade Mark**.....: 华特/HUATE

**Model/Type reference**.....: HT9510, HT952

**Manufacturer**.....: Guangzhou Bofei Co.,Ltd

**Address**.....: First Floor (Part) , And Fifth Floor(Part),No.8 Plant, Yinsha Industrial District,Xintang Town,, District,Guangzhou City



**Classification**.....: FFP2 NR



